

Gebrauchsanweisung Thermocover

	<p>Nach Entnahme aus dem Sterilbeutel das Thermocover in die Edelstahlschale einlegen. Der Aluminiumboden des Bezuges muss außen/unten sein und in Kontakt mit der Schüsselinnenseite.</p> <p>Verwenden Sie den Bezug niemals ohne Schale! Der Sterilbezug darf nur einmal verwendet werden.</p>
	<p>Die transparente Folienschürze nach unten über den Schalenständer ziehen.</p> <p>Den Bezug niemals mit einem defekten Schalenständer verwenden (Thermofühler des Gerätes überprüfen).</p> <p>Verwendung des Thermocovers nur für Schalen mit einem maximalen Außendurchmesser von 350 mm, für andere Abmessungen bitte den passenden Bezug bei megro anfragen.</p> <p>Verwenden Sie ausschließlich Bezüge mit dem patentierten Aluminiumboden, um die Gefahr von Unsterilität beim Einsatz von nicht temperaturbeständigen Folienbezügen zu vermeiden.</p>
	<p>Das Thermocover mit mindestens 1,5 Liter steriler Kochsalzlösung befüllen.</p> <p>Im Betrieb darauf achten, dass sich mindestens 0,5 Liter Kochsalzlösung im Thermocover befinden.</p>
	<p>Nach dem Befüllen die Heizfunktion des Schalenständers einschalten und die Kochsalzlösung dadurch erwärmen.</p> <p>Bei der Entnahme von Kochsalzlösung keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände verwenden. Niemals spitze oder scharfkantigen Gegenstände in die Schale werfen!</p>

Produkt ist patentrechtlich geschützt durch Europapaten Nr. EP2524665