

Anleitung und Hinweise zur Reinigung

von Krankenhauswaren aus Edelstahl

1. Das Produkt bitte vor und nach Nutzung reinigen. (Vor Erstgebrauch und nach jedem Gebrauch muss das Produkt mit warmen Wasser gereinigt, desinfiziert und falls möglich, mit destilliertem Wasser abgespült und anschließend vorsichtig getrocknet werden.)
2. Um Korrosion zu vermeiden, bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in Kontakt mit säurehaltigen/aggressiven Desinfektionsmitteln oder anderen nicht-kompatiblen Substanzen kommt. Desinfektionsmittel müssen mit den geltenden nationalen Vorschriften für Desinfektionsmittel (wie FDA-Genehmigung und CE-Zeichen) übereinstimmen. Zum Trocknen der Teile nutzen Sie bitte fusselfreie Einwegtücher. Nutzen Sie zum Trocknen der Löcher öl-freie Druckluft. Das Produkt bitte sauber und trocken lagern.
3. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht weiter benutzt werden, tauschen Sie es bitte umgehend aus.